

N - アッセイ LA RF-K用多点標準血清  
**RF標準血清 [ L A ]**

[内 容] RF標準血清 6濃度 各1mL×1瓶 成分:RF陽性血清

[使用目的] RFの多点検量線による測定

[使用方法] 本品をそのまま使用して下さい。

[使用上または取り扱い上の注意]

- 1.本品は、HBs抗原、HIV抗体およびHCV抗体検査において陰性の結果を得ておりますが、感染の危険性があるものとして、検体と同様に十分に注意して取り扱って下さい。
- 2.標準血清は冷所保存とし、凍結を避けて下さい。
- 3.本品には防腐剤として0.1%以下のアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の金属アジドを生成することが報告されています。これらの物質の生成を防ぐために、本品または本品を含んだ廃液等を廃棄する際には、十分量の水で洗い流して下さい。
- 4.各アッセイは、下記のアッセイ表及び容器ラベルに記載されていますので、確認してから使用して下さい。
- 5.使用の際には、この説明書に記載された方法に従って下さい。使用期限の過ぎた標準血清は使用しないで下さい。

[貯 法] 2～10 に保存。

[有効期間] 1年間。最終使用期限は容器ラベル及び外箱に表示。

[アッセイ表]

	RF値(WHO準拠)
標準血清A	0 IU / mL
標準血清B	15 IU / mL
標準血清C	75 IU / mL
標準血清D	150 IU / mL
標準血清E	300 IU / mL
標準血清F	600 IU / mL

製造販売元 **ニッポーメディカル株式会社**  
 発売元 〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島1  
 TEL 03-4582-5420  
 FAX 03-3238-4590