



204941-100

ナノピア[®] KL-6 用 KL-6 キャリブレーター

使用説明書

本品は自動分析装置を用いて、「ナノピア[®] KL-6」を使用し、血清又は血漿中のシアル化糖鎖抗原KL-6を測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

【使用法】

1. 本品をそのまま使用します。
2. KL-6濃度は、瓶ラベルに記載してあります。

【取扱い上の注意事項】

1. 本品はナノピア[®] KL-6 用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には、防腐剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。また、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。

【包装】 1.0mL × 4濃度 × 1

【貯蔵方法】 2~10°C

【使用期限】 外装に表示してあります。

製造元

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋二丁目1番3号