

# HISCL™ PIVKA-IIキャリブレータ

\* 2017年 4月改訂(第2版)  
2015年 4月作成(第1版)

\* **REF** 520273

この使用説明書をよく読んでから使用してください。

## 【使用法】

- (1) 本品はHISCL PIVKA-II試薬のキャリブレータとして使用してください。
- (2) HISCL PIVKA-II 試薬の添付文書及び測定に使用する機器の取扱説明書に従って操作してください。
- (3) 本品には、下記の構成試薬が含まれています。いずれも凍結乾燥品ですので、精製水1 mLを加え、蓋をして5分静置後、緩やかに転倒混和を10回以上行い、内容物を完全に溶解してから使用してください。

HISCL PIVKA-II C0	1 mL分×1本	HISCL PIVKA-II C3	1 mL分×1本
HISCL PIVKA-II C1	1 mL分×1本	HISCL PIVKA-II C4	1 mL分×1本
HISCL PIVKA-II C2	1 mL分×1本	HISCL PIVKA-II C5	1 mL分×1本
- (4) 本品は、サンプルカップに約200 µL分注して使用してください。
- (5) 溶解後は、2~8 °Cで保存してください。溶解後、2~8 °Cでの有効期間は90日です。

## 【較正用基準物質に関する情報】

社内較正用基準物質

## 【使用上又は取扱い上の注意】

- (1) 本品の原料であるヒト由来成分は、HIV-1抗体及びHIV-2抗体、HCV抗体、HBs抗原、HBV DNA、HCV RNAの検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染の危険性を完全に否定できるものではありません。また、それ以外のウイルスに関する試験はしていません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に十分注意をして取扱いをしてください。
- (2) 誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

## \* 【保管方法・有効期間】

保管方法: 2~8 °Cに保存

有効期間: 15カ月(使用期限は、外箱に表示しています。)

## \* 【表示値】

本ロットの表示値は、以下の通りです。使用する機器の取扱説明書に従って、正しく入力してください。

ロット	ZS0002
使用期限	2021-09-30
構成試薬	表示値
HISCL PIVKA-II C0	0 mAU/mL
HISCL PIVKA-II C1	39 mAU/mL
HISCL PIVKA-II C2	417 mAU/mL
HISCL PIVKA-II C3	3,892 mAU/mL
HISCL PIVKA-II C4	15,100 mAU/mL
HISCL PIVKA-II C5	97,300 mAU/mL

バーコード



HISCLはシスメックス株式会社の登録商標です。

\* 製造販売元

## 積水メディカル株式会社

東京都中央区日本橋二丁目1番3号

製造元

## シスメックス国際試薬株式会社

神戸市西区高塚台4-3-2 〒651-2271