



204910-100

# IL-2R キャリブレーターN

## 使用説明書

本品は自動分析装置を用いてナノピア® IL-2Rを使用し、血中のIL-2Rを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

### 【使用法】

1. 本品をそのまま使用します。
2. IL-2R 濃度は、瓶ラベルに記載してあります。
3. 生理食塩液を 0 U/mL として使用し、5 濃度でのキャリブレーションを行ってください。

### 【取扱い上の注意事項】

1. 本品は、ナノピア® IL-2R用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

【包装】 1.0mL×4濃度×1

【貯蔵方法】 2～10℃

【使用期限】 外装に表示してあります。

製造元 **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋二丁目1番3号