



200271-100

血液化学自動分析用

## コレステスト<sup>®</sup>コントロール 1/2

本品は自動分析装置を用いてコレステスト<sup>®</sup>N HDL、コレステスト<sup>®</sup>LDLを使用し、血清(漿)中のHDLコレステロール、LDLコレステロールを測定する際にデータ管理用として使用するものです。

血清(漿)中総コレステロール、中性脂肪の測定にも使用できます。

### 〔使用法〕

本品1バイアルに精製水を正確に1.0mL加えて溶解してください。溶解を確認後穏やかに20回程度転倒混和し、1時間常温で静置します。なお、使用前には穏やかに転倒混和します。

調製後の安定性は2~10°C保存で1週間です。

### 〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は血液化学自動分析用の管理血清ですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、HBs抗原陰性、HIV抗体(AIDSウイルス抗体)陰性、HCV抗体陰性を確認した血清から調製されておりますが、ご使用の際には感染の危険のあるものとして、検体と同様に十分ご注意の上お取扱いください。

### 〔包装〕

1mL用×12

### 〔貯法〕

2~10°C

### 〔使用期限〕

外装に表示してあります。

### 〔濃度〕

外装に表示してあります。

製造元 **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号