



204637-101

ナノピア® BNP-A用 BNPコントロール

使用説明書

本品は、ナノピア® BNP-Aを使用し、血漿中のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP)を測定する際に、データ管理用として使用するものです。

【使用法】

1. 本品1バイアルに精製水を正確に0.5mL加えて溶解し、室温に5分以上静置した後、数回転倒混和し使用します。
2. 調製後の安定性は2~10°Cで1日間、凍結保存(-20°C以下)すれば1ヵ月間安定です。但し、凍結融解は1回に限ります。

【取扱い上の注意事項】

1. 本品は、ナノピア® BNP-A用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、HBs抗原陰性、HCV抗体陰性、HIV抗体陰性を確認したヒト由来成分を含んでおります。ご使用の際には感染の危険のあるものとして、検体と同様に十分ご注意の上、お取り扱いください。
3. 本品は冷水で溶けにくい場合がありますので、20°C前後の精製水で溶解して下さい。
4. 本品には防腐剤としてプロクリン300が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。
5. 本品を廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従い、医療廃棄物又は産業廃棄物などとして処理してください。
6. 本品の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法等の規制に留意してください。

【包装】 0.5mL用×2濃度×3本

【貯蔵方法】 2~10°C

【使用期限】 外装に表示してあります。

ナノピア® BNP-Aでの参考測定値

Lot No. 106RHQ

I : 80 ~ 120 pg/mL

II : 745 ~ 1118 pg/mL

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋二丁目1番3号