



204927-100

IL-2R コントロールN

使用説明書

本品は自動分析装置を用いてナノピア®IL-2Rを使用し、血中のIL-2Rを測定する際にデータ管理用として使用するものです。

【使用法】

本品をそのまま使用します。

【取扱い上の注意事項】

1. 本品は、ナノピア® IL-2R用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

【包装】 1.0mL × 2濃度 × 3

【貯蔵方法】 2 ~ 10°C

【使用期限】 外装に表示してあります。

ナノピア® IL-2Rでの参考測定値

Lot No. 205RKQ

IL-2R コントロールN Level I : 401 ~ 601 U/mL

IL-2R コントロールN Level II : 1558 ~ 2338 U/mL

製造元

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋二丁目1番3号