



202718-100

# シスタチンC キャリブレーターN

## 使用説明書

本品は自動分析装置を用いてノルディア<sup>®</sup>シスタチンCを使用し、血清又は血漿中のシスタチンCを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

本品のシスタチンC濃度はERM-DA471/IFCC(IRMM)を基準に設定した値です。

### 【 使用法 】

1. 本品をそのまま使用します。
2. シスタチンC濃度は、瓶ラベルに記載してあります。

### 【 取扱い上の注意事項 】

1. 本品は、ノルディア<sup>®</sup>シスタチンC用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には、防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

### 【 包 装 】

2mL × 5濃度

### 【 貯 法 】

2 ~ 10℃

### 【 使用期限 】

外装に表示してあります。

製造元 **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号