



202800-100

## Dダイマーコントロール

本品は、ラピッドチップ<sup>®</sup>Dダイマーを使用し、血漿又は全血中のDダイマーを測定する際に、データ管理用として使用するものです。

### 【使用法】

1. 本品に精製水を正確に0.5mL加えて溶解し、室内温度(15~30°C)で30分間静置後、穏やかに攪拌してから使用します。
2. コントロールを測定する際は、事前にコントロールの製造番号とバイアル番号(1又は2)を装置に登録してください。

### 【取扱い上の注意事項】

1. 本品は、ラピッドチップ<sup>®</sup>Dダイマー用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 濃度は各バイアルに記載してあります。
3. 調製後は2~10°Cで24時間安定です。
4. 調製後の凍結保存はできません。
5. 本品は、HBs抗原、HCV抗体、HIV抗体陰性を確認したヒト血液成分から調製しておりますが、使用の際には手袋などを着用し、検体と同様に感染の危険のあるものとして十分注意して取扱ってください。
6. 本品は、防腐剤としてプロクリン300が含まれており、皮膚などを刺激する場合があります。もし、皮膚や衣類についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は医師の手当てを受けてください。

### 【包装】

0.5mL用×2濃度×1

### 【参考測定値】

バイアルに表示してあります。

### 【貯法】

2~10°C

### 【使用期限】

外装に表示してあります。

製造元

**積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号