

C反応性蛋白用管理血清

# セロノルム CRP

## Level 3

Seronom CRP

Batch No. 2103820 有効期限:2024年5月

セロノルム CRPは液状の管理血清で、C反応性たんぱくの分析の精密さと正確さを管理するため特別に企画されたCRP測定用管理血清です。

### — 特 長 —

- 冷暗所で長期間安定です。
- 常に安定したデータが得られますので、 $\bar{X}$ -R管理の際のコントロール血清として最適です。

### — 使用法 —

本品は調製済みですので、一般血清と同様にそのままお使いください。

### — 安定性 —

開封後 2~8℃で1ヵ月、15~25℃で1週間安定です。

### — 保 存 —

2~8℃保存

### [取扱い上の注意]

本品は、HBs抗原陰性、HIV抗体陰性、HCV抗体陰性を確認した血清から調製されておりますが、ご使用の際は感染の危険のあるものとして、検体と同様に十分ご注意の上お取り扱いください。防腐剤は使用していません。

### ◇ナノピア CRPによる参考測定値のご案内

バイアル：Lot	参考測定値
Level 3：Lot. 2103820	6.59 ~ 8.57

本参考値は次の汎用自動分析装置により求めております。  
H7180、LST006、AU680、BM9130、TBA120FR

「ナノピア」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。  
その他の商標は各社の日本における商標または登録商標です。

輸入元 **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋二丁目1番3号

製造元 **SERO**