



203517-100

2015年8月作成

# ゾニサミドキャリブレーター

## 使用説明書

本品は、自動分析装置を用いて「ナノピア®TDM ゾニサミド」を使用し、血清又は血漿中のゾニサミドを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

### 【 使用法 】

本品をそのまま使用します。

### 【 取扱い上の注意事項 】

1. 本品は「ナノピア®TDM ゾニサミド」用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、HBs 抗原陰性、HIV 抗体陰性、HCV 抗体陰性を確認したヒト由来成分から調製しておりますが、使用の際には感染の危険性のあるものとして、検体と同様に十分注意して取り扱ってください。

【 包装 】 A : 2.5mL×1  
B～F: 1.0mL×1

【 貯法 】 2～8℃

【 使用期限 】 外装に表示してあります。

### 【 濃度 】

A	0.0 $\mu\text{g/mL}$
B	5.0 $\mu\text{g/mL}$
C	10.0 $\mu\text{g/mL}$
D	20.0 $\mu\text{g/mL}$
E	40.0 $\mu\text{g/mL}$
F	80.0 $\mu\text{g/mL}$

製造元 **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号