



203524-100

2015年8月作成

ゾニサミドコントロール

使用説明書

本品は、自動分析装置を用いて「ナノピア®TDM ゾニサミド」を使用し、血清又は血漿中のゾニサミドを測定する際にデータ管理用として使用するものです。

【 使用法 】

本品をそのまま使用します。

【 取扱い上の注意事項 】

1. 本品は「ナノピア®TDM ゾニサミド」用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、HBs 抗原陰性、HIV 抗体陰性、HCV 抗体陰性を確認したヒト由来成分から調製しておりますが、使用の際には感染の危険性のあるものとして、検体と同様に十分注意して取り扱ってください。

【 包 装 】

2.5mL×3濃度×1

【 貯 法 】

2~8℃

【 使用期限 】

外装に表示してあります。

【 濃 度 】

| | |
|---------|------------------------|
| Level 1 | 6.4 ~ 9.6 μ g/mL |
| Level 2 | 20.0 ~ 30.0 μ g/mL |
| Level 3 | 40.0 ~ 60.0 μ g/mL |

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋三丁目13番5号