



Q. 「キューベットが不足しています」というエラーが画面にでました。どうすればよいですか？

A. ①キューベットそのものが不足しているか、
②キューベットがあってもうまく供給できていない可能性があります。

対処方法	<p>①キューベット供給部を確認してください。</p> <p>②キューベットが不足している場合</p> <p>→キューベットを追加して投入してください。</p> <p>③キューベット供給部にキューベットの割れた破片などがある場合</p> <p>→破片など、キューベット供給ラインの妨げになるものを除いてください</p> <p>④以上の操作を行っても問題が解決しない場合は、下記にご連絡ください。</p>
メンテナンス ガイド 参照ページ	<p>コアプレスタ2000 10.2「今日のメンテナンス」の下記のページをご確認ください。</p> <p>10-5ページ「16.キューベット供給部の清掃」(所要時間:約10分)</p>
ご連絡先	<p>月曜日～金曜日9時から17時半まで:製品・学術・修理など 平日17時半以降および日曜・祝日:修理について承ります。</p> <p>積水メディカル株式会社コールセンター</p> <p>0120-249-977</p>