



Q. 「キュベットがセットされていません」というエラーが画面にでました。どうすればよいですか？

A. ①キュベットそのものが不足しているか、
②キュベットセンサーが正常に作動していない可能性があります。

対処方法	<p>①「キュベットが不足しています」のエラーが出ているかどうか確認してください →キュベットが不足している場合はキュベットを追加してください。</p> <p>③キュベットが不足していない場合</p> <p>→スロープにキュベットがあるか確認してください。キュベットがあっても、エラーが出ている場合はセンサーが汚れている場合がありますので乾いた綿棒でクリーニングを御願います。清掃してください。</p> <p>④センサーを清掃してもキュベットが供給されない場合はセンサーの感度調整が必要と考えられますので、下記コールセンターまでご連絡を願います。</p>
メンテナンス ガイド 参照ページ	<p>コアプレスタ2000 10.2「今日のメンテナンス」の下記のページをご確認ください。</p> <p>10-6ページ「17.キュベット供給部センサの清掃」(所要時間:約5分)</p>
ご連絡先	<p>月曜日～金曜日9時から17時半まで:製品・学術・修理など 平日17時半以降および日曜・祝日:修理について承ります。</p> <p>積水メディカル株式会社コールセンター 0120-249-977</p>