


ラピッドテスト[®] RSV-アデノ 検体採取・測定法

検体採取法

(RSウイルス及びアデノウイルス検出時使用可能)

鼻腔ぬぐい液

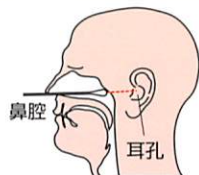

鼻腔ぬぐい液採取用綿棒（キット付属品）を鼻腔から耳孔を結ぶ平面を想定し挿入します。コットンと行き止まる鼻腔の奥まで綿棒が達したら、鼻腔粘膜を数回こすり取ります。

(RSウイルス及びアデノウイルス検出時使用可能)


鼻腔吸引液



吸引装置にトラップ付き吸引カテーテルをセットし、一方のカテーテルの先を鼻腔に入れ、鼻腔液を吸引します。トラップに集められた鼻腔液にキット付属の綿棒を浸し、検体を採取します。

(アデノウイルス検出時使用可能)


咽頭ぬぐい液

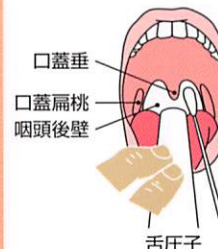

大きく口をあけ、舌圧子で舌を押さえます。口蓋、扁桃、咽頭後壁に別売の綿棒（咽頭ぬぐい液採取用）を強くこすりつけ、検体を丁寧に採取します。この時綿棒が頬の内側、舌や歯に触れないように注意します。

* 検体採取後、すぐに測定できない場合は、乾燥しないように密閉して冷蔵（2～10℃）保存し、24時間以内に測定してください。

測定法

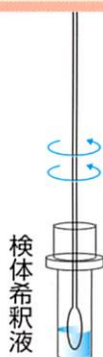

綿棒を検体希釈液に入れ、回すようにして検体を抽出します。




綿棒をチューブの上から指で挟み、綿球内の検体をよく絞り出します。




チューブにテストスティックを浸漬させ、反応させます。

判定

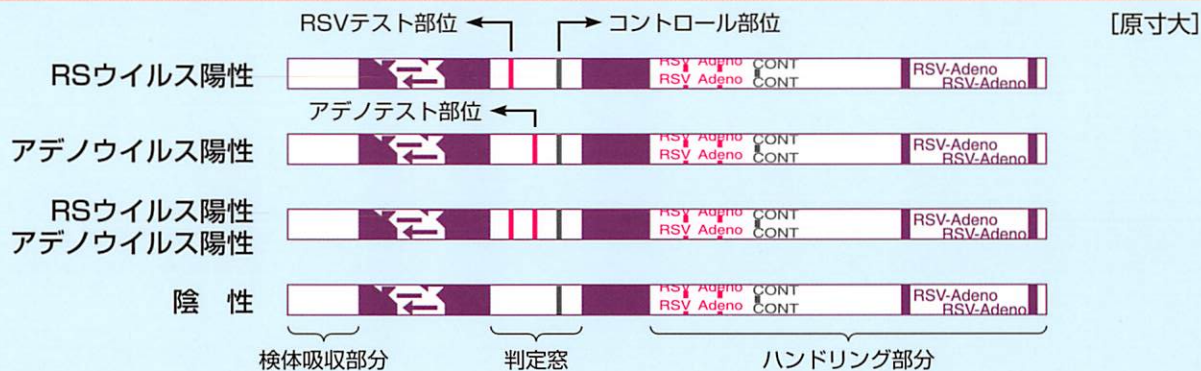

* キットご使用の際には添付文書をよくお読みください。
* 測定結果に基づく臨床判断は、臨床症状や他の検査結果などと合わせて担当医師が総合的に判断してください。

よくあるご質問

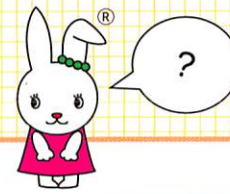

Q. 適用検体は何ですか？

A. RSウイルス検出：鼻咽頭検体（鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液）
アデノウイルス検出：鼻咽頭検体（鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液）、又は咽頭ぬぐい液

Q. RSウイルスまたはアデノウイルスの陽性ラインが、コントロールラインに比べ薄いのですが、陽性と判定して良いのですか？

A. 判定時間（10分）以内にRSウイルスまたはアデノウイルスの反応部位にラインが見られる場合はコントロールラインより薄くとも陽性と判定します。RSウイルスまたはアデノウイルスの陽性ラインは採取されたウイルスの量によりコントロールのラインより薄くなったり濃くなったりします。

Q. 10分以上放置してしまったのですが…

A. 時間が経過するとテストスティックの乾燥や、前処理検体の逆流などにより結果が変化する可能性がありますので、判定時間をお守りください。

Q. 保険請求の際の検体検査判断料と検査実施料は何点ですか？

A. 検体検査判断料：免疫学的検査判断料 144点
検体検査実施料：RSウイルス抗原精密測定 150点
アデノウイルス抗原精密測定 210点
RSウイルス抗原精密測定は、入院中の患者において当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。（H20.3.5 保医発第0305001号）

Q. RSウイルスを外来で測定した場合、保険請求できますか？

A. 平成20年3月5日に発行されました保医発第0305001号において、RSウイルス抗原精密測定は入院中の患者において当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用することが定められております。従って、外来で測定した場合にはRSウイルスの保険請求できません。

製造販売元

積水メディカル株式会社

製造元

Genzyme Diagnostics (USA)

本 社：〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目13番5号 TEL. 03(3272)0681 (代表)
北海道営業所：〒060-0005 札幌市中央区北五条西六丁目2番2号 TEL. 011(272)7288 (代表)
東北営業所：〒980-0014 仙台市青葉区本町三丁目5番21号 TEL. 022(263)8560 (代表)
東日本営業所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目5番7号 TEL. 03(5520)1360 (代表)
首都圏第一営業所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目5番7号 TEL. 03(5520)1360 (代表)
首都圏第二営業所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目5番7号 TEL. 03(5520)1360 (代表)
中部営業所：〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目5番11号 TEL. 052(209)7714 (代表)
西日本第一営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原三丁目3番31号 TEL. 06(6350)6581 (代表)
西日本第二営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原三丁目3番31号 TEL. 06(6350)6581 (代表)
中国営業所：〒732-0052 広島市東区光町一丁目10番19号 TEL. 082(261)7862 (代表)
九州営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目26番29号 TEL. 092(451)0511 (代表)

積水メディカルホームページ <http://www.sekisuimedical.jp>



この用紙は古紙100%再生紙を使用しています。

RS-03

0909 D I 50

POCT
検査

鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液中の
A型又はB型インフルエンザウイルス抗原の検出用

ラピッドテスタ® FLUスティック
(承認番号21700AMY00225000)

鼻腔吸引液又は鼻腔ぬぐい液中のA型又は
B型インフルエンザウイルス抗原の検出用

ラピッドテスタ® FLU II
(承認番号21600AMY00104000)

咽頭拭い液中のA群B溶連菌抗原検出用

ラピッドテスタ® ストレップA
(承認番号21400AMY00228000)

咽頭粘膜上皮細胞中のアデノウイルス抗原検出用

ラピッドテスタ® hsアデノ
(承認番号21900AMX00207000)

糞便中ロタウイルス抗原及び
アデノウイルス抗原検出用

ラピッドテスタ® ロタ-アデノ
(承認番号21300AMY00429000)