

# MMP-3コントロールL

本品は、パナクリアMMP-3「ラテックス」を用いて、自動分析装置により血清・血漿中のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3（MMP-3）を測定する際に、正確に測定されているかどうか確認するための精度管理用試料です。

## 〔包装単位〕

| 試薬名          | 内容     |
|--------------|--------|
| MMP-3コントロールL | 1 mL×4 |

## 〔使用法〕

1. 本品は、調製済みですのでそのまま使用してください。

## 〔表示値〕

1. 表示値（MMP-3濃度）は、ロットにより異なりますのでご注意ください。
2. 本ロットの表示値は、以下の通りです（容器ラベルにも表示してあります）。

ロット：OF0371

|                | 表示値    |
|----------------|--------|
| MMP-3濃度（ng/mL） | 88～118 |

## 〔使用上又は取扱い上の注意〕

1. 本品はパナクリアMMP-3「ラテックス」の精度管理にのみご使用ください。
2. 本品はHBs抗原陰性、HIV抗体（AIDS抗体）陰性、HCV抗体陰性を確認したヒト由来成分を原料として含みますが、ご使用の際には感染の危険のあるものとして、検体と同様に十分ご注意ください上お取扱ください。
3. 本品には防腐剤としてプロクリン300が含まれており、皮膚などを刺激する場合があります。もし皮膚や衣服についたときは、速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症が生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

## 〔貯法・使用期限〕

1. 貯蔵方法：2～10℃

※※2. 使用期限：2018年12月

## ※※〔お問い合わせ先〕

積水メディカル株式会社      学術担当  
電話番号 0120-249-977  
FAX番号 0120-247-477

---

※ 製造 **協和ファーマケミカル株式会社**  
〒933-8511 富山県高岡市長慶寺530番地

※※ 販売 **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋二丁目1番3号