



202084-101

2017年1月改訂

MMP-3キャリブレーター

使用説明書

本品は、自動分析装置を用いてパナクリア®MMP-3「ラテックス」を使用し、血清又は血漿中のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)を測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

〔使用法〕

1. 本品をそのまま使用してください。
2. 試薬ブランクには生理食塩液を使用してください。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は、パナクリア®MMP-3「ラテックス」用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には、防腐剤としてプロクリン300が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

〔包装〕 1mL×5濃度

〔貯蔵方法〕 2～10℃

〔使用期限〕 外装に表示してあります。

〔濃度〕

①	100 ng/mL
②	200 ng/mL
③	400 ng/mL
④	800 ng/mL
⑤	1600 ng/mL

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋二丁目1番3号