

HISCL™ KL-6キャリブレータ

* 2017年 4月改訂 (第3版)
2016年 5月改訂 (第2版)

* **REF** 520303

この使用説明書をよく読んでから使用してください。

【使用法】

- (1) 本品はHISCL KL-6試薬のキャリブレータとして使用してください。
- (2) HISCL KL-6試薬の添付文書及び測定に使用する機器の取扱説明書に従って操作してください。
- (3) 本品には、下記の構成試薬が含まれています。いずれも調製済みですのでそのまま使用してください。

HISCL KL-6 C0	1 mL × 1本	HISCL KL-6 C3	1 mL × 1本
HISCL KL-6 C1	1 mL × 1本	HISCL KL-6 C4	1 mL × 1本
HISCL KL-6 C2	1 mL × 1本		
- (4) 本品は、サンプルカップに約200 µL分注して使用してください。
- (5) 開封後の有効期間は90日です。

【使用上又は取扱い上の注意】

- (1) 本品は、HBs抗原、HIV抗原抗体、HIV-1抗体及びHIV-2抗体、HCV RNA陰性であることを確認していますが、その取扱いには感染の危険があるものとして十分注意してください。また、各構成試薬はアジ化ナトリウムを含有していますが、法的には毒物として扱われません。アジ化ナトリウムは、鉛、銅などと反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、廃棄の際は大量の水と共に流してください。
- (2) 誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、水で洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

* 【保管方法・有効期間】

保管方法: 2～8 °Cに保存

有効期間: 12カ月(使用期限は、外箱に表示しています。)

* 【表示値】

本ロットの表示値は、以下の通りです。使用する機器の取扱説明書に従って、正しく入力してください。

ロット	ZS1002
使用期限	2022-05-31
構成試薬	表示値
HISCL KL-6 C0	0 U/mL
HISCL KL-6 C1	245 U/mL
HISCL KL-6 C2	994 U/mL
HISCL KL-6 C3	3107 U/mL
HISCL KL-6 C4	6709 U/mL

バーコード



HISCLはシスメックス株式会社の登録商標です。

*

製造販売元

積水メディカル株式会社

東京都中央区日本橋二丁目1番3号

製造元

シスメックス国際試薬株式会社

神戸市西区高塚台4-3-2 〒651-2271

AV708186D