

LRGコントロールセット

本品はナノピアLRGを使用し、血清中のロイシンリッチ α 2グリコプロテイン(LRG)を測定する際に、データ管理用として使用するものです。

【使用法】

本品をそのまま使用します。

【取扱い上の注意事項】

1. 本品は、ナノピアLRG用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には防腐剤としてプロクリン 950 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。
3. 本品を廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従い、医療廃棄物又は産業廃棄物などとして処理してください。
4. 本品の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法等の規制に留意してください。

【包装】 1.5mL×2濃度×1

【貯蔵方法】 2～8℃

【使用期限】 外装に表示してあります。

ナノピアLRGでの参考測定値

LRGコントロール 1 : 10.0～15.0 μ g/mL

LRGコントロール 2 : 16.0～24.0 μ g/mL

「ナノピア」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋二丁目1番3号