

ルシカ[®] GA-L専用 GA-L キャリブレーター

本品は、ルシカ[®] GA-Lの値を校正するためのキャリブレーターです。
ご使用にあたり、以下の説明をよくお読み下さい。

【調製方法】

1. GA-L キャリブレーターバイアル瓶（凍乾品）を冷蔵庫から取り出し、室温に放置します。
2. 室温に戻したGA-L キャリブレーターのバイアル瓶に、正確に1.00mLの精製水を加えて、室温で静置後、ローター等で混和するか又は、静かに転倒混和を実施し完全に溶解させます。

【使用方法】

GA-L キャリブレーターの使用方法は、自動分析装置の取扱説明書に従って下さい。

【使用上の注意】

1. キャリブレーターは、HBs抗原、HIV抗体、HCV抗体およびHTLV抗体検査で陰性の血清を用いて製造されています。しかし感染性を否定できる完全な検査方法がありませんので、使用時は検体の取扱いと同様ご注意下さい。
2. キャリブレーターのグリコアルブミン濃度、アルブミン濃度は、貼付の基準値表に表示してあります。基準値はロット毎に異なりますのでご注意下さい。
3. キャリブレーターは、調製後2～10℃の条件で2週間使用できます。調製後は密栓状態で保存し、液の濃縮は絶対に避けて下さい。
4. 期限切れの試薬は使用しないで下さい。
5. 測定後は、感染性廃棄物として処理して下さい。
6. 試薬が誤って目や口等に入った場合は、直ちに水で十分に洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当を受けて下さい。

【保存方法】

GA-L キャリブレーターは、2～10℃で保存して下さい。

【有効期間】

GA-L キャリブレーターの有効期間は、2～10℃保存で製造から12ヵ月です。表示の有効期限をお守り下さい。

【包装単位】

1. GA-L キャリブレーター	1 mL用× 2本
2. 基準値表	1枚

製造販売元

旭化成ファーマ株式会社

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

連絡先：診断薬製品部

〒101-8101 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

Tel：03-3296-3617 Fax：03-3296-3682