

ルシカ® GA-L専用 GA-L 管理血清L, H

第一版
作成日：2008.12

本品は、ルシカGA-Lを使用し、血液中グリコアルブミンを測定する際に、精度管理用の検体として使用するものです。
ご使用にあたり、以下の説明をよくお読み下さい。

〔調製方法〕

1. GA-L管理血清バイアル瓶（凍乾品）を冷蔵庫から取り出し、室温に10分間放置します。
2. 室温に戻したGA-L管理血清L及びHのバイアル瓶にホールピペットを用い、正確に3.00mlの精製水を加え静かに転倒混合後、完全に溶解するまで室温に20分間静置します。

〔使用上の注意〕

1. 本品は、HBs抗原、HIV抗原・抗体、HCV抗体およびHTLV-I抗体検査で陰性の血清を用いて製造されています。しかし感染性を否定できる完全な検査方法がありませんので、使用時は検体の取扱いと同様ご注意ください。
2. 本品のGA濃度、アルブミン濃度は、添付の管理値表に表示してあります。管理値はロット毎に異なりますのでご注意ください。
3. 本品は調製後密栓の上、2～8℃の条件で1ヶ月間使用できます。
4. 期限切れの管理血清は使用しないで下さい。
5. 測定後は、感染性廃棄物として処理して下さい。
6. 本品が誤って目や口等に入った場合は、直ちに水で十分に洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けて下さい。

〔保存方法〕

2～8℃で保存して下さい。

〔有効期間〕

本品の有効期限は、2～8℃保存で12ヵ月です。表示の有効期限をお守り下さい。

〔包装単位〕

1. GA-L 管理血清 L	3 mL用×1本
2. GA-L 管理血清 H	3 mL用×1本
3. 管理値表	1 枚

製造販売元

旭化成ファーマ株式会社

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

連絡先：診断薬製品部

〒101-8101 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

Tel：03-3296-3617 Fax：03-3296-3682