



200998-100

ノルディア<sup>®</sup>シスタチンC用  
**シスタチンC コントロール**

**使用説明書**

本品は、ノルディア<sup>®</sup>シスタチンCを使用し、血清又は血漿中のシスタチンCを測定する際に、データ管理用として使用するものです。

**〔使用法〕**

本品をそのまま使用します。

**〔取扱い上の注意事項〕**

1. 本品は、ノルディア<sup>®</sup>シスタチンC用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、HBs抗原陰性、HIV抗体陰性、HCV抗体陰性を確認したヒト由来成分を含んでおります。ご使用の際には感染の危険のあるものとして、検体と同様に十分ご注意の上、お取り扱いください。
3. 本品には、防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

**〔包装〕**

2mL × 2濃度 × 3

**〔貯法〕**

2～10℃

**〔使用期限〕**

外装に表示してあります。

ノルディア<sup>®</sup>シスタチンCでの参考測定値

シスタチンCコントロールⅠ : 0.5mg/L (中央値 0.5 ± 0.2)

シスタチンCコントロールⅡ : 2.0mg/L (中央値 2.0 ± 0.4)

**製造元** **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号