



200899-100

ノルディア®U-ALB用
U-ALBコントロール

本品は、ノルディア®U-ALBを使用し、尿中の微量アルブミンを測定する際に、データ管理用として使用するものです。

〔使用法〕

本品をそのまま使用します。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は、ノルディア®U-ALB用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、HBs抗原、HCV抗体、HIV抗体陰性を確認したヒト血液成分から調製しておりますが、使用の際には手袋などを着用し、検体と同様に感染の危険のあるものとして十分注意して取り扱ってください。
3. 本品には、防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

〔包装〕

2mL×2濃度×3

〔貯 法〕

2～10℃

〔使用期限〕

外装に表示してあります。

ノルディア®U-ALBでの参考測定値

U-ALBコントロールⅠ：32～48 μg/mL

U-ALBコントロールⅡ：96～144 μg/mL

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋三丁目13番5号