



202749-001

インスリンキャリブレーター

使用説明書

本品は自動分析装置を用いてノルディア®インスリンを使用し、血清又は血漿中のインスリンを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

【使用法】

1. 本品をそのまま使用します。
2. インスリン濃度は、瓶ラベルに記載してあります。

【取扱い上の注意事項】

1. 本品はノルディア®インスリン用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

【包装】

1.0mL × 6 濃度

【貯法】

2 ~ 10℃

【使用期限】

外装に表示してあります。

製造元

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋三丁目13番5号