



203272-100

L-FABP キャリブレーター

使用説明書

本品は自動分析装置を用いて、ノルディア® L-FABPを使用し、尿中のL-FABPを測定する際に、キャリブレーターとして使用するものです。

【 使用法 】

1. 本品をそのまま使用します。
2. L-FABP 濃度は、瓶ラベルに記載してあります。
3. 生理食塩液を 0ng/mL として使用し、6濃度でのキャリブレーションを行ってください。

【 取扱い上の注意事項 】

1. 本品は、ノルディア® L-FABP用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、防腐剤としてプロクリン300が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣類に付着した場合は水で十分洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当を受けてください。

【 包装 】 1.0mL用 × 5濃度

【 貯法 】 2～10℃

【 使用期限 】 外装に表示してあります。

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋三丁目13番5号