



200172-100

自動分析装置用 ナノピア[®]用TDMキャリブレーター

本品は自動分析装置を用いて、「ナノピア[®]TDM カルバマゼピン」、「ナノピア[®]TDM フェノバルビタール」、「ナノピア[®]TDM フェニトイン」、「ナノピア[®]TDM バルプロ酸」、又は「ナノピア[®]TDM テオフィリン」を使用し、血清又は血漿中のカルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、バルプロ酸、又はテオフィリンを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

〔使用法〕

本品をそのまま使用します。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は自動分析装置用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には、防腐剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。また、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。

〔包装〕

ナノピア[®]用TDMキャリブレーター 2mL×6

〔貯法〕

2～8℃

〔使用期限〕

外装に表示してあります。

〔濃度〕

	①	②	③	④	⑤	⑥
カルバマゼピン	0 μg/mL	2 μg/mL	4 μg/mL	8 μg/mL	12 μg/mL	20 μg/mL
フェノバルビタール	0 μg/mL	5 μg/mL	10 μg/mL	20 μg/mL	40 μg/mL	80 μg/mL
フェニトイン	0 μg/mL	2.5 μg/mL	5 μg/mL	10 μg/mL	20 μg/mL	40 μg/mL
バルプロ酸	0 μg/mL	12.5 μg/mL	25 μg/mL	50 μg/mL	100 μg/mL	150 μg/mL
テオフィリン	0 μg/mL	2.5 μg/mL	5 μg/mL	10 μg/mL	20 μg/mL	40 μg/mL

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋三丁目13番5号

100728