



202206-102

ナノピア[®]用テイコプラニン キャリブレーター

使用説明書

本品は、自動分析装置を用いて「ナノピア[®]TDM テイコプラニン」を使用し、血清又は血漿中のテイコプラニンを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

〔使用法〕

本品をそのまま使用します。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は「ナノピア[®]TDM テイコプラニン」用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、防腐剤として0.1w/v%以下のアジ化ナトリウムを含有しています。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際には大量の水と共に洗い流してください。また、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当を受けてください。

〔包装〕

1 mL × 6 濃度 × 1

〔貯法〕

2 ~ 10 °C

〔使用期限〕

外装に表示してあります。

〔濃度〕

①	0.0 $\mu\text{g/mL}$
②	10 $\mu\text{g/mL}$
③	35 $\mu\text{g/mL}$
④	50 $\mu\text{g/mL}$
⑤	75 $\mu\text{g/mL}$
⑥	100 $\mu\text{g/mL}$

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋三丁目13番5号

130423