



202176-100

# ナノピア<sup>®</sup>用アルベカシンキャリブレーター

## 使用説明書

本品は、自動分析装置を用いて「ナノピア<sup>®</sup>TDMアルベカシン」を使用し、血中のアルベカシンを測定する際にキャリブレーターとして使用するものです。

### 〔使用法〕

室内温度 (15~30°C) で融解した後、転倒混和し、使用します。融解後は冷蔵 (2~8°C) 保存で5週間安定です。

### 〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は、「ナノピア<sup>®</sup>TDM アルベカシン」用のキャリブレーターですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品はHBs抗原陰性、HIV抗体陰性、HCV抗体陰性を確認したヒト由来成分を含んでおりますが、使用の際には感染の危険性のあるものとして、検体と同様に十分注意の上お取扱ってください。
3. 本品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含まれておりますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。また、アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。

### 〔包装〕

1.0 mL × 6濃度 × 1

### 〔貯法〕

-25°C ~ -15°C

### 〔使用期限〕

外装に表示してあります。

### 〔濃度〕

A	0.0 µg/mL
B	2.0 µg/mL
C	5.0 µg/mL
D	10.0 µg/mL
E	20.0 µg/mL
F	30.0 µg/mL

輸入元 **積水メディカル株式会社**  
東京都中央区日本橋三丁目13番5号

製造元 **Microgenics Corporation**  
46360 Fremont Boulevard, Fremont, CA 94538-6406 USA