



970907-101

セディア ブロムペリドールキャリブレーター 使用説明書

本品は、ブロムペリドール測定時のキャリブレーターとして使用するものです。
本品のご使用に際しては、セディアーHAL/BRPの添付文書も参照してください。

【内 容】

低値キャリブレーター(約 0ng/mL) 青色キャップ 7.5mL/容器
高値キャリブレーター(約40ng/mL) 赤色キャップ 5.0mL/容器

【使用方法】

使用の前に穏やかに転倒混和し、そのまま使用してください。
表示値はロット毎に瓶ラベルに記載してあります。

【使用上の注意】

1. 本品は防腐剤としてアジ化ナトリウム(0.09%)を含有しております。アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。また、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。
2. 本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
3. 本品は本記載の用途以外には使用しないでください。
4. キャップを間違えないよう注意してください。

【貯 法】

凍結を避け、2～8℃に保存。

【使用期限】

外装に表示してあります。

【開封後の安定性】

開封後は密栓して 2～8℃に保存し、60 日以内にご使用ください。

輸入元

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋三丁目13番5号

製造元

Microgenics Corporation
46500 Kato Road, Fremont, CA 94538 USA